

Tableau de dosage deconex® pour désinfectants et concentrés détergents

Instructions pour préparer une solution prête à l'emploi de désinfectant ou de détergent deconex®. La quantité de solution prête à l'emploi correspond à de l'eau du robinet avec du désinfectant ou concentré détergent (p. ex. pour obtenir 10 litres d'une solution à 2 %, 200 ml de concentré doivent être ajoutés à 9,8 litres d'eau du robinet). Suivez les recommandations et instructions du fabricant.

Pourcentage de la solution prête à l'emploi	0.25 %	0.50 %	0.75 %	1.00 %	1.50 %	2.00 %	3.00 %	4.00 %	5.00 %
Volume total de solution prête à l'emploi	Quantité nécessaire de désinfectant ou de concentré détergent (ml)								
0.5 litre	1.25	2.5	3.75	5	7.5	10	15	20	25
1 litre	2.5	5	7.5	10	15	20	30	40	50
2 litre	5	10	15	20	30	40	60	80	100
3 litre	7.5	15	22.5	30	45	60	90	120	150
4 litre	10	20	30	40	60	80	120	160	200
5 litre	12.5	25	37.5	50	75	100	150	200	250
6 litre	15	30	45	60	90	120	180	240	300
7 litre	17.5	35	52.5	70	105	140	210	280	350
8 litre	20	40	60	80	120	160	240	320	400
9 litre	22.5	45	67.5	90	135	180	270	360	450
10 litre	25	50	75	100	150	200	300	400	500
15 litre	37.5	75	112.5	150	225	300	450	600	750
20 litre	50	100	150	200	300	400	600	800	1000
25 litre	62.5	125	187.5	250	375	500	750	1000	1250
30 litre	75	150	225	300	450	600	900	1200	1500